


CA
TÁ
LO
GO

ANTIDOPING 2025

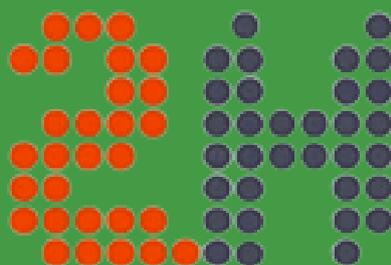

MEDglobal

PANEL MULTIDROGAS

CAJA CON 25
PIEZAS

Rapid[™]
Response




PANEL 3 PARÁMETROS



\$688 PESOS
MÁS IVA

(THC-COC-MET)

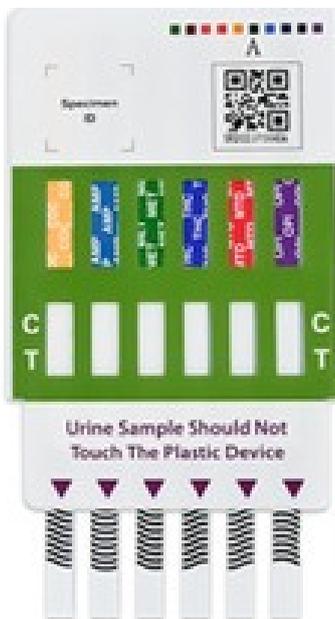

PANEL 5 PARÁMETROS



\$990 PESOS
MÁS IVA

(THC-COC-AMP
-OPI-MET)

DESCRIPCIÓN


Tu empresa tiene que ser un lugar seguro de trabajo, por eso en **2H Medglobal** nos enfocamos en tener todo lo que necesitas para garantizar que esto suceda. Nos orgullece representar en exclusiva a **RAPID RESPONSE** de **BTNX** en todo México.

Hechas en **Canadá**, son las pruebas mas confiables del mercado. Utilizadas por las principales empresas e industrias Internacionalmente.

24 años de experiencia nos respaldan. El servicio al cliente es una prioridad para nosotros.



PRUEBAS RÁPIDAS, CONFIABLES Y DE ALTA CALIDAD

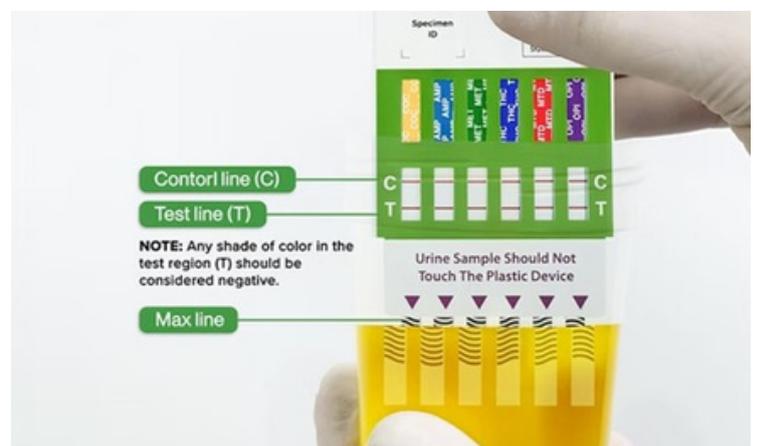

CARACTERÍSTICAS



Hecho en CANADÁ.



Aprobado por Health Canada (Equivalente a la FDA).



Registro Sanitario de la SSA.



Certificado ISO 9000.



Prueba rápida utilizada para detectar una droga específica en muestras de orina.



Resultado listo en minutos.



99.99% de precisión.



Configuración de los niveles de corte SAMHSA.



Caja con 25 paneles.

PREGUNTAS FRECUENTES



¿Qué es una prueba de drogas en orina? Una prueba de drogas en orina (UDS), es un procedimiento que analiza una muestra de orina para detectar la presencia de drogas o metabolitos.

¿Cuál es el propósito de una prueba de drogas en orina?



- **Empleo:** Los empleadores pueden exigir que los posibles empleados se sometan a una prueba de drogas antes de contratarlos. Algunos también pueden realizar pruebas periódicas o aleatorias a los empleados, especialmente en puestos sensibles a la seguridad.



- **Razones legales o forenses:** Es posible que se realicen pruebas a las personas para ver si el consumo de drogas influyó en ciertos incidentes, como los accidentes de tráfico.



- **Fines médicos:** los profesionales de la salud pueden utilizar una prueba de drogas en orina para diagnosticar trastornos por abuso de sustancias, controlar el tratamiento contra las drogas o asegurarse de que los pacientes estén tomando los medicamentos recetados.



- **Deportes:** Los atletas pueden ser evaluados para garantizar que no se hayan utilizado drogas que puedan mejorar el rendimiento de un individuo.



- **Programas de rehabilitación y recuperación:** las personas bajo supervisión de tratamiento por trastornos por uso de sustancias pueden someterse a pruebas periódicas para garantizar el cumplimiento del programa.



- **Preocupaciones de seguridad:** En entornos laborales sensibles a la seguridad, como en el transporte o la operación de maquinaria pesada, se pueden implementar pruebas periódicas.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Dónde se usa?



Las pruebas de detección de drogas en orina se utilizan en organizaciones deportivas, en casos legales y en el hogar. Estas pruebas se utilizan durante las evaluaciones previas al empleo, las pruebas posteriores a un accidente o en cualquier situación en la que se sospeche del uso de drogas.

¿Cómo funciona?

Los medicamentos que toma un individuo se descomponen y excretan a través de la orina. La prueba identifica estos metabolitos de fármacos siguiendo los principios de la cromatografía de afinidad.



Las pruebas de detección de drogas en orina de respuesta rápida utilizan tecnología avanzada de nanopartículas:

La membrana de la tira reactiva está previamente recubierta con conjugados fármaco-proteína en las líneas de prueba. En un extremo de la membrana de la tira reactiva, hay anticuerpos farmacológicos conjugados con nanopartículas coloreadas. Los conjugados fármaco-proteína compiten por los sitios limitados de unión de anticuerpos con los fármacos que pueden estar presentes en la orina. En ausencia de fármaco en la orina, la solución del conjugado anticuerpo-nanopartícula coloreado se moverá junto con la muestra de orina por la tira hasta la zona del conjugado fármaco-proteína inmovilizada en la región de prueba (T). Luego, el complejo anticuerpo-nanopartícula se une a los conjugados fármaco-proteína para formar líneas visibles.

Cuando el fármaco está presente en la orina, el antígeno fármaco/metabolito compite con el conjugado fármaco-proteína por la región de la línea de prueba (T). Por una concentración suficiente del fármaco, llenará el conjugado anticuerpo-nanopartícula limitado hasta la zona del conjugado fármaco-proteína en la región de la línea de prueba (T). Por lo tanto, la ausencia de la línea de color en la región de la prueba (T) indica un resultado positivo.

RAPID RESPONSE EN LAS NOTICIAS

Es el Resultado de ser una de las pruebas mas utilizadas y confiables de el mercado. <https://www.btnx.com/news>



RAPID READER APP

¡Nuestro nuevo y mejorado software de detección carga los resultados de las pruebas a su base de datos en segundos!

Toma el control de tu salud y deja de sobrecargar tus procesos con papeleo físico. Al utilizar nuestro marco simple, puede registrar y cargar datos directamente a su base de datos.

RapidReader está diseñado para automatizar la gestión de inventario y optimizar el flujo de trabajo para lograr la máxima eficiencia. La aplicación es 100% compatible con productos seleccionados de **Rapid Response**®. El soporte técnico está disponible por teléfono o correo electrónico y los usuarios tienen acceso a la plataforma las 24 horas del día, los 7 días de la semana en cualquier dispositivo móvil o tableta.



CONDICIONES GENERALES

Todos nuestros precios son más IVA.

Precios de contado.

Nuestros precios son más transporte, el seguro lo debe contratar el cliente por su cuenta o a través nuestra. Una vez entregado el paquete a paquetería no nos hacemos responsables por pérdida, robo o maltrato.

Cambio de precios sin previo aviso.

En caso de que aplique una garantía para algún producto, el costo del envío del cliente al proveedor correrá por cuenta del cliente.

Tiempos de entrega sujetos a disponibilidad de inventario.



LOCAL

Abierto de Lunes a viernes, de
09:00 a 18:00 horas.

Av.Educacion 194-5

SLP.Mexico, 78213



CONTACTO

www.2hmedglobal.com

info@2hmedglobal.com

Telefono: (444) 8416205

Whatsapp: (444)8050438